

Protocolo IPR



Stripping 0.10mm - 0.15mm

APERTURA

CONTORNEADO

MEDICIÓN

PULIDO



KL-OS080P



KL-OS40



KL-IPR-DC SET



KL-OS15

Manual clínico
ORTHO-STRIPS



Stripping 0.10mm - 0.25mm

APERTURA

ACABADO

MEDICIÓN

CONTORNEADO

MEDICIÓN

PULIDO



KL-OS080P



KL-OS25



KL-IPR-DC SET



KL-OS40



KL-IPR-DC SET



KL-OS15

Stripping 0.25mm - 0.35mm

APERTURA

REDUCCIÓN GRUESA

MEDICIÓN

CONTORNEADO

MEDICIÓN

ACABADO

PULIDO



KL-OS080P



KL-OS60



KL-IPR-DC SET



KL-OS40



KL-IPR-DC SET



KL-OS25



KL-OS15

Stripping 0.35mm - 0.5mm

ALTO CORTE

CONTORNEADO

MEDICIÓN

ACABADO

PULIDO



KL-OS80C



KL-OS40



KL-IPR-DC SET



KL-OS25



KL-OS15


Intensiv IPR-SET

Bandeja con orificios para el paso del flujo del líquido desinfectante y el vapor esterilizable.

Soportes de silicona reemplazables con código de color (esterilizables).

CONTENIDO

- Contra-ángulo W&H Synea
- Expulsador Ref. KL-053

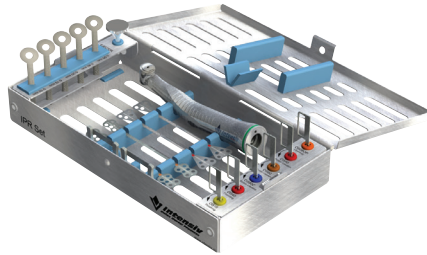

Sin luz + 6 limas

KL-IPR-WG-69 A

Con luz + 6 limas

KL-IPR-WG-69 LT

Contenido		Función	Espesor lima (mm)
Intensiv Ortho-Strips	KL-OS60	Segundo paso para la creación de espacio	0.28
	KL-OS40	Primer paso para la creación de espacio	0.19
	KL-OS15	Pulido de la superficie	0.12
Intensiv Ortho-Strips Opener	KL-OS08OP	Apertura de los puntos de contacto	0.13
Intensiv Ortho-Strips Coarse	KL-OS80C	Creación del espacio, alta eficiencia de corte	0.31
Manual:			
Intensiv ApproxOpener	KL-AO2018OS	Apertura mono-lateral de los puntos de contacto	
Intensiv Tira manual (Grano grueso/medio)	KL-OSM8040	Creación eficiente del espacio	
Intensiv Tira manual (Grano extrafino/ultrafino)	KL-OSM1508	Para el acabado y el pulido del esmalte	
Intensiv IPR Distance Control	KL-IPR-DC010	Medidor del espacio cerrado 0.10 mm	
	KL-IPR-DC015	Medidor del espacio cerrado 0.15 mm	
	KL-IPR-DC020	Medidor del espacio cerrado 0.20 mm	
	KL-IPR-DC040	Medidor del espacio cerrado 0.40 mm	
	KL-IPR-DC050	Medidor del espacio cerrado 0.50 mm	

IPR - Distance Control (Galgas)




Espesores:

0,10 mm - 0,15 mm - 0,20 mm - 0,25 mm - 0,30 mm - 0,40 mm - 0,50 mm - 1,00 mm

KL-IPR-DC SET

Ortho-Strip tiras manuales

- Granulometría gruesa.

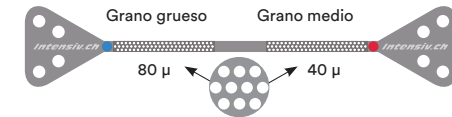

Confección 6 unidades

KL-OSM8040/6

- Granulometría fina y extra fina.



Confección 6 unidades

KL-OSM1508/6

Intensiv Swingle Profesional Ortho



CONTENIDO

- Contra-ángulo W&H Synea
- Expulsador Ref. KL-053
- Pulidor de boquilla Ref. KL-054
- Intensiv Ortho-Strips Ref. KL-OS60
- Intensiv Ortho-Strips Ref. KL-OS40
- Intensiv Ortho-Strips Ref. KL-OS25
- Intensiv Ortho-Strips Ref. KL-OS15
- Intensiv Ortho-Strips Opener Ref. KL-OS08OP
- Intensiv Ortho-Strips Coarse Ref. KL-OS80C

Con luz

KLWG-69-LTO

Sin luz

KLWG-69-AO

Ortho-Strips Tray Set

Incluye:

KLOS080P
KLOS80C
KLOS60C-CEN-DS
KLOS40M-CEN-DS
KLOS25F-CEN-DS
KLOS15P-CEN-DS



Bandeja con 6 limas

KLOST400SET02/6

Intensiv Ortho-Strips mecánico

	Doble cara	Izquierda	Derecha
08 micras	KL-OS080P/3	KL-OS080P-L/3	KL-OS080P-R/3
80 micras	KL-OS80C/3	KL-OS80C-L/3	KL-OS80C-R/3
60 micras	KLOS60/3	KLOS60L/3	KLOS60R/3
40 micras	KLOS40/3	KLOS40L/3	KLOS40R/3
25 micras	KLOS25/3	KLOS25L/3	KLOS25R/3
15 micras	KLOS15/3	KLOS15L/3	KLOS15R/3

Confección 3 unidades

Contacta con nosotros para realizar los pedidos



93 409 06 00 - info@katiadental.com
www.katiadental.com