

### 3.1. Instalación del filtro HEPA.



Para proteger el componente durante el transporte, no se ha instalado un filtro HEPA en el dispositivo. Se ha colocado dentro de la cámara, en una bandeja. Sáquelo de la cámara, sáquelo de la bolsa y, por sí mismo, enróscuelo con cuidado en la ranura prevista para ello (véase la figura). El filtro debe enrroscarse a mano (aprox. 7 vueltas) hasta que se sienta resistencia - si se sigue enrroscando se dañará el filtro y se inmovilizará el esterilizador.

